

FLOWFLEX SARS-CoV-2 ANTIGEN Rapid Test (Self-Testing)



CARATTERISTICHE


Tipologia Test: tampone nasale anteriore

One-step Test: facile da eseguire

Risparmia tempo: risultato in 15 minuti

Specifiche di confezionamento: 1 tests/box

FLOWFLEX SARS-CoV-2 ANTIGEN Rapid Test (Self-Testing)

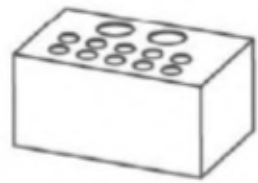

Tube Holder
(for 25T only)



Disposable Swab



Test cassette



Extraction Buffer Tube



Package Insert



Waste Bag

CONTENUTO

- Porta provette
- Tampone monouso
- Cassetta
- Tubo tampone di estrazione
- Foglietto illustrativo
- Sacchetto rifiuti

FLOWFLEX SARS-CoV-2 ANTIGEN Rapid Test (Self-Testing)

PROCEDIMENTO

Lavare le mani



Leggere le istruzioni



Controllare la data di scadenza



Apri la confezione



Controllare la cassetta



Finestra dei risultati

Porta campione

Raccolta campione



Inserire l'intera punta assorbente del tampone in una narice. Utilizzando una leggera rotazione, spingere il tampone a meno di 2,5 cm dal bordo della narice.




Ruotare il tampone 5 volte sfiorando l'interno della narice.



Rimuovere il tampone e inserirlo nell'altra narice.



Rimuovere il tampone dalla narice.

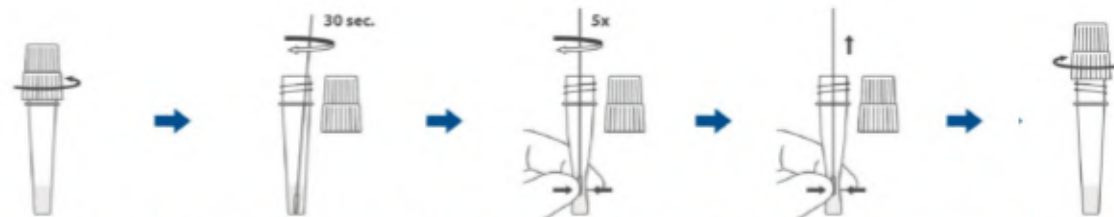

Svitare il tappo del contagocce.

Inserire il tampone nella provetta e agitare per 30 secondi

Ruotare il tampone 5 volte mentre si stringe il lato della provetta

Rimuovere il tampone mentre si stringe il tubo

Avvitare il tappo del contagocce



Versare 4 gocce

15-30 min.



Negativo



Positivo



Nulla

